



CONTOUR®NEXT-mittari ja CONTOUR®NEXT-testiliuska

Kuvaus	CONTOUR®NEXT-verenglukoosin seurantajärjestelmä, joka on yhteensopiva CONTOUR®DIABETES-sovelluksen kanssa.
Testiliuska	CONTOUR®NEXT-testiliuska, tuotenumero 84030881. Purkissa on 50 liuskaa.
Säilyvyys	Testiliuskan säilyvyys on 24 kk valmistuksesta. Liuskat säilyvät purkissa merkittyy päivämäärään saakka, myös avattuna.
Kalibrointi/Koodaus	Ei Koodausta™ -teknologian ansiosta CONTOUR®NEXT-mittari koodautuu automaattisesti aina, kun testiliuska asetetaan paikoilleen.
Mittausaika	5 sekuntia
Näytemäärä	0,6 µl kapillaariverta. Näyte voidaan myös ottaa laskimoverestä. Mittaus ei käynnisty, mikäli verinäyte ei ole riittävä.
Veren lisääminen	Second-Chance®-toiminnon avulla verta voi lisätä samaan liuskaan 60 sekunnin ajan.
Ateriamerkinnät	Kyllä
Tavoitealueen osoitin	SmartLIGHT®-toiminto ilmoittaa välittömästi mittauksen jälkeen, onko mittaustulos alle tavoitealueen (punainen), tavoitealueen sisällä (vihreä) tai yli tavoitealueen (keltainen).
Valaistus	Valo liuskaportissa.
Mittausalue	0,6–33,3 mmol/l
Käyttölämpötila	5–45 °C
Tarkkuus	Täyttää ja ylittää EN ISO 15197:2015 -standardin vaatimukset. ¹ Soveltuu erityistä tarkkuutta vaativille potilasryhmille (lapset, raskaana olevat, jatkuvaa verenglukoosin seurantaa käyttävät).
Muisti	Tallentaa 800 viimeisintä mittaustulosta.



¹ CONTOUR®NEXT-käyttöohje



Sovellus	Yhdistettävissä CONTOUR®DIABETES-sovellukseen Bluetooth®-tekniikan avulla. Yhdistämällä mittarin CONTOUR®DIABETES-sovellukseen tulokset synkronoituvat automaattisesti. Ilmainen CONTOUR®DIABETES-sovellus ladataan App Store®- tai Google Play™ -kaupasta ja on saatavilla sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmälle. Sovelluksessa voi mm. tarkastella kaavoja, lisätä merkintöjä ja kuvia sekä asettaa mittausmuistutuksia ja hälytyksiä. Raportit voidaan lähettää hoitohenkilökunnalle.
Keskiarvot	Mahdollisuus nähdä 7, 14, 30 ja 90 päivän keskiarvot mittarin lokikirjasta.
Määrittäminen	FAD-GDH kemia FAD-entsyymin ansiosta CONTOUR®NEXT-mittari on turvallinen käyttää myös vatsakalvo- eli peritoneaalidialyysipotilaille (PD-dialyysi).
Referenssimenetelmä	Antaa verengluukoosiarvot suhteessa plasman glukoosiin.
Tiedonpurku	Tiedonpurku toimii Ascensian oman maksuttoman GlucoContro.online-purkuohjelman avulla. Toimii sekä PC- että MAC-tietokoneissa (Windows ja iOS).
Käyttö	Mittari käynnistyy ja koodautuu automaattisesti aina, kun testiliuskan näytteenottopää (harmaa) asetetaan liuskaoporttiin. Veri imeytyy testiliuskaan ja mittaus alkaa, kun verta on testiliuskassa riittävästi.
Aloituspakkauksen sisältö	CONTOUR®NEXT-verengluukoosimittari, CONTOUR®NEXT-testiliuskoja, MICROLET®NEXT-pistolaite, MICROLET®-lansetteja. Mittarissa on valmiiksi asennettuna 2 kpl kahden voltin CR2032 paristoa. Paketissa on mukana suojakotelo, yksityiskohtainen käyttöopas ja pikaopas.
Tuotantopakkaus	8 kpl
Sisältää PVC:tä	Ei
Merkintä	CE-merkintä
Takuu	5 vuotta
Tuotenumerot	CONTOUR®NEXT-verengluukoosimittari 90008855 CONTOUR®NEXT-verengluukoositestiliuskat 84030881



Ascensia Diabetes Care Finland Oy

Hiilikatu 3, 00180 Helsinki

diabetes.ascensia.fi

Asiakaspalvelu

0800 172 227

tuotetuki@ascensia.com

Tilaukset

diabetes.2@ascensia.com

**Contour
next**
Blood Glucose Monitoring System

* Lue käyttöohjeet, jos haluat lisätietoja ISO 15197:2015-standardista.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logo, Contour, No Coding, Microlet ja Second Chance ovat tavaramerkkejä ja/tai Ascensia Diabetes Care Holdings AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja näiden merkkien mahdollinen käyttö on Ascensia Diabetes Caren käyttöluvan alaista. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta, ja niitä käytetään vain tiedotuksellisisa tarkoituksissa. © Copyright 2024.