

SUOJAKÄSINE RAAPIJALLE – KÄYTTÖOHJE

Koon määrittäminen

Oikean käsinekoon määrittämiseksi mittaa käsi keskisormen kärjestä kämmenen tyveen (rannetta ei lasketa mukaan).

Käyttötarkoitus

Suojakäsine on tarkoitettu levottomille potilaille, jotka voivat raapia itseään tai aiheuttaa vahinkoa itselleen tai lähellä oleville henkilöille. Käsine auttaa ehkäisemään mahdollisia vammoja ihmisille ja/tai esineille.

Tätä lääkinnällistä laitetta ei ole tarkoitettu muihin kuin tässä dokumentaatiossa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Valmistaja ei vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä.

Kuvaus ja materiaalit

- Sisäpehmuste: 100 % silikonisoitua ontelokuitua
- Ulkopinta: 100 % puuvillaa
- MTP-materiaali: ulkopuolella 100 % polyamidia ja sisäpuolella 100 % eetteripohjaista polyuretaania

Käyttöohje

- 1 Aseta käsi käsineen omaan taskuun niin, että kämmen on pehmustettua osaa vasten.
- 2 Sulje ranne mukana olevalla tarranauhalla.
- 3 Jos potilas on erittäin levoton, voidaan käyttää soljella varustettua kiinnityshihnaa käden kiinnittämiseksi sänkyyn.

Vasta-aiheet ja varoitukset

- Ei vasta-aiheita, ellei hoitava lääkäri toisin ilmoita.
- Laitte ei ole steriili.
- Noudata pesuohjeita.
- Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

Huolto ja puhdistus / pesu

- Pese haaleassa vedessä, enintään 30 °C, käyttäen herkille tekstiileille tarkoitettua pesuainetta.
- Huuhtelee huolellisesti.
- Poista ylimääräinen vesi puristamalla vaate pyyhkeen sisällä.
- Älä väännä.
- Kuivaa kaukana lämmönlähteistä.
- Ei silitystä.

Pakkaustyyppi

Pakattu muovipussiin.

Hävittäminen

- Tekniset ohjeet → paperinkeräys
- Muovipussi → muovinkeräys
- Suojakäsine → sekajäte

Takuu

Tuotteella on lain mukainen takuu. Valmistusvirheiden osalta kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Muut tiedot

- CND-koodi: M030599
- EMDN-koodi: M030599
- BD/RDM-koodi: 2521243
- Lääkinnällinen laite, luokka I – EU-asetus (EU) 2017/745

Valmistaja

Albo Land srl
Via Mastroianni 9
40013 Castel Maggiore (Bologna), Italia
Puhelin: +39 051 373838
Faksi: +39 051 19875902
www.alboland.com
info@alboland.it

Vakavan vaaratilanteen sattuessa on ilmoitettava sekä valmistajalle että sen EU-jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä tai potilas sijaitsee.

Käsineen oikean koon mittaaminen (mittausohje)

M -koko 19 cm tai alle pituudelle

L -koko 20 cm tai yli pituudelle

