

## Testitulokset

Tulosnäytön merkintöjen vahvuudella, värillä tai voimakkuudella ei ole vaikutusta tai merkitystä testitulokseen. T- ja C-merkinnät ovat lyhenteitä T = testaus (Test) ja C = kontrolli (Control).

### 1. Negatiivinen tulos

Tulosnäytöllä on vain yksi värillinen viiva C-merkinnän kohdalla. Tämä tarkoittaa, että veressä ei ole havaittu borreliabakteerin vasta-aineita.




### 2. Positiivinen tulos

Tulosnäytöllä on kaksi värillistä viivaa T- ja C-merkintöjen kohdalla. Huomaa, että värin intensiteetti voi olla erilainen T- ja C-merkintöjen kohdalla. Tämä tulos tarkoittaa, että veressä on borreliabakteerin vasta-aineita. Ota yhteyttä lääkäriin.



### 3. Epäonnistunut testitulokset

Jos tulosnäytölle ei tule lainkaan viivaa tai viiva näkyy ainoastaan T-merkinnän kohdalla, testi on epäonnistunut ja se tulee hävittää. Huomaa, että kotitestiä ei voi käyttää uudelleen. Suosittelemme, että teet uuden testin.

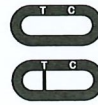

## Usein kysytyjä kysymyksiä

### Miten testi toimii?

Jos punkki on tartuttanut henkilöön borrelioosiin, veressä on IgM-nimistä vasta-ainetta. Borrelioosi TIK ALERT tunnistaa tämän vasta-aineen.

### Milloin testi pitää tehdä?

Suosittelemme, että testi tehdään 2-4 kuluttua epäilystä punkin puremasta tai kun punainen alue muodostuu puremakohtaan. Huomioi, että vain 1-2 % punkin puremiksi tulleista ihmisistä saa borrelioosiin. Positiivinen testitulokset merkitsee tulehdusta, joten ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin.

### Voiko tulos olla väärä?

Tulos on oikea, jos testi on suoritettu ohjeiden mukaisesti. Testi voi kuitenkin olla virheellinen, jos testikasetti on altistunut kosteudelle tai jos veren määrä ei ole riittävä. Mukana oleva pipetti varmistaa oikean määrän verta.

**Onko tulosikkunan viivojen vahvuudella merkitystä testitulokseen?** Viivojen värillä tai intensiteetillä ei ole vaikutusta tai merkitystä tulokseen. Jos voit erottaa viivan, se tulkitaan viivaksi.

### Mitä C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa?

C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa, että testi toimii normaalisti.

### Voiko testitulokseen luottaa, jos tarkistan sen 15 minuutin kuluttua?

Ei. Testitulokset tulee tarkistaa 10 minuutin kuluttua siitä, kun liuos on laitettu näyteaukkoon. 15 minuutin kuluttua testi ei ole enää luotettava ja se pitää hävittää.

## Usein kysytyjä kysymyksiä

### Mitä teen, jos testin tulos on positiivinen?

Positiivinen testitulokset tarkoittaa, että veressä on borrelioosiin vasta-aineita. Ota yhteyttä lääkäriin, joka päättää jatkotutkimuksista ja hoidosta.

### Mitä teen, jos testin tulos on negatiivinen?

Negatiivinen testitulokset tarkoittaa, että verestä ei löytynyt borreliabakteerin vasta-aineita. Jos punkinpurema on alle 2 viikkoa vanha, todennäköisesti vasta-ainetta ei ole ehtinyt vielä muodostua. Suosittelemme, että teet uuden testin 2-6 viikkoa pureman jälkeen. Jos sinulle nousee kuumeita tai kutinaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä lääkäriin.

### Kuinka turvallinen testi on?

Tutkimukset osoittavat 93 prosentin luotettavuuden.



	Lue ohjeet ennen käyttöä		In vitro -diagnostiikkaan käyttöön		Älä käytä uudelleen
	Säilytys +4° -> +30°C		Eränumero		Eräntymispäivä
	Valmistaja	MD-080020 m5 c - Tarkistettu 2022/01			