

Pelastuslakana



Pelastuslakana, koko 75 x 165cm

Materiaalina polypropeeni. Vetohihnan pituus 4m ja leveys 5cm, lukot kestävät 150kg vetolujuuden.

Hinta 49,50€ alv 0%

Saatavilla tilaustuotteena myös 120 cm patjaan.



Pelastuslakana asetetaan vuoteeseen patjan alle niin, että vetopään turvavyö tulee kainaloiden kohdalle. Yläturvavyö kiristetään sopivan tiukaksi potilaan jäädessä patjoineen ja peittoineen turvavyön sisään. Toinen turvavyö kiristetään jalkojen yli. Tämän jälkeen turvavyöt aukaistaan ja kiinnitetään yhteen sängyn alla, jolloin vyöt ovat poissa tieltä ja valmiiksi säädettyinä mahdollista evakuointia varten.

Evakuointia suoritettaessa lukot aukaistaan sängyn alta ja kiinnitetään potilaan rinnan yli kainaloiden kohdalta, toinen jalkojen päältä.

Patja nostetaan nostokahvojen avulla lattialle ja vedetään vetohihnan avulla ulos.

Patjan yläosa jää vedettäessä hieman koholleen lattiasta, jolloin potilaan pää on suojassa kolhuilta.

Muista harjoitella pelastuslakanan käyttöä!