

LIDER-PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Lider-pyörätuoli on suunniteltu tarjoamaan turvallisen ja mukavan liikkumisen kaikissa arjen tilanteissa. Tuolia on saatavana sekä manuaalisena että sähkötoimisena mallina. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet

- Tarkista ennen käyttöä, että kaikki osat ovat ehjät ja kunnolla kiinnitetyt.
- Älä ylitä valmistajan ilmoittamaa painorajoitusta (125 kg).
- Käytä jarruja aina pysähtyessä, siirtyessä tai noustessa tuolista.
- Älä käytä pyörätuolia jyrkillä tai liukkailla pinnoilla ilman avustajaa.
- Älä seiso jalkatuilla tai nouse tuolista, jos jarrut eivät ole lukittuina.
- Pidä sormet poissa taittomekanismista ja liikkuvista osista.
- Sähkömallissa: älä altista akkua tai latausporttia kosteudelle.

Käyttöohjeet (manuaalimalli)

Taittaminen ja avaaminen: Vedä istuimen keskiosasta ylös taittaaksesi tuolin. Paina alas sivuilta avataksesi.

Jarrut: Paina jarrukahvat eteenpäin lukitaksesi pyörät. Vedä taaksepäin vapauttaaksesi.

Käsinojat ja jalkatuet: Käsinojat voivat olla kiinteät tai ylösnostettavat. Jalkatuet voidaan kääntää sivuun tai irrottaa kokonaan.

Liikkuminen: Pidä kiinni työntövantesta ja työnnä eteenpäin liikkumista varten. Kääntyminen tapahtuu vetämällä toisella kädellä taaksepäin.

Käyttöohjeet (sähkömalli)

Ohjausyksikkö:

- Virtapainike: käynnistää ja sammuttaa laitteen.
- Nopeussäädin: säätää ajonopeutta (1–5).
- Suuntavipu: ohjaa eteen, taakse ja sivuille.

Lataus:

- Sammuta tuoli ennen latausta.
- Kytke laturi laitteen latausporttiin ja vasta sen jälkeen pistorasiaan.
- Lataa vain kuivassa tilassa.
- Täysi lataus kestää noin 6–8 tuntia.

Akun huolto:

- Älä pura akkua täysin usein.
- Jos tuolia ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku kerran kuukaudessa.

Huolto ja puhdistus

- Puhdista runko kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- Tarkista pulttien ja mutterien kireys säännöllisesti.
- Renkaat: pidä ilmanpaine suositusarvossa (katso renkaan kyljestä).
- Sähkömallissa: tarkista johdot ja liittimet kulumien varalta.
- Älä käytä painepesuria tai liiallista vettä.

Vianetsintä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pyörät eivät rullaudu sujuvasti	Renkaissa likaa tai matala paine	Puhdista ja lisää ilmaa
Jarrut eivät pidä	Kuluneet osat tai säätötarve	Säädä tai vaihda jarrut
Tuoli ei käynnisty (sähkömalli)	Akku tyhjä / irronnut liitin	Tarkista ja lataa akku
Ohjaus ei toimi	Sulake palanut	Vaihda sulake ohjeen mukaisesti

Säilytys ja kuljetus

Taita tuoli kokoon vetämällä istuimen keskeltä. Säilytä kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa kosteudelta. Älä jätä akkua varattuna pitkiksi ajoiksi kylmään. Kuljetuksen ajaksi irrota akku ja lukitse liikkuvat osat.

Takuu ja huoltopalvelu

Takuu kattaa valmistusviat kahden (2) vuoden ajan ostopäivästä. Takuu ei kata normaalia kulumista tai virheellistä käyttöä. Huollot ja varaosat saa valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Valmistaja

Forta S.L.
Calle Valencia 200, Zaragoza, Espanja
www.fortasl.com